



# Procédure hygiène et désinfection des mannequins de secourisme & du maquillage

## HYGIENE MASQUES DE VISAGE (tableau au verso à remplir)

### 1 masque de visage unique pour tous les stagiaires

Tous les stagiaires peuvent utiliser un masque installé en permanence sur le visage du mannequin **A LA SEULE CONDITION** :

- Que le participant ne présente pas de maladie contagieuse (herpès buccal,...) le jour de la formation,
- De procéder à une désinfection complète après chaque stagiaire avec des lingettes à usage unique, spray désinfectant, eau de javel, ... (Une désinfection correcte du masque de visage du mannequin garantit de bonnes conditions d'hygiène durant la formation. Néanmoins, il peut arriver que certains stagiaires se sentent plus rassurés s'il existe un écran entre leurs lèvres et les surfaces ayant déjà été en contact avec d'autres lèvres).
- Utiliser des feuilles de protection du visage pour mannequins qui sont conçues pour offrir ce type d'écran et permettent de s'entraîner à l'utilisation de cette protection en situations réelles. (fortement recommandé)

### 1 masque de visage par stagiaire

- Désinfection de chaque masque de visage après chaque formation au moyen de kit de désinfection (plusieurs fabricants ou de l'eau de javel)

La procédure se déroule en trois étapes :

- 1- Nettoyage
- 2- Rinçage
- 3- Désinfection

*Utilisation de l'eau de javel (recommandations INRS)*

- Faire tremper et frotter les masques dans de l'eau savonneuse (par exemple liquide vaisselle dilué).
- Bien rincer à l'eau courante.
- Faire tremper 10 min au moins dans de l'eau de Javel diluée à 1,2 % de Chlore dans de l'eau froide. Utiliser de l'eau de Javel pure, sans additif détergent qui serait irritant pour les muqueuses.
- Bien rincer à l'eau courante.
- Terminer par une pulvérisation d'alcool à 70°.
- Laisser sécher.

## ENTRETIEN DES MANNEQUINS (tableau au verso à renseigner)

- Désinfection après chaque formation au moyen de kit d'entretien & désinfection (plusieurs fabricants ou de l'eau de javel)

## REPLACEMENT DES POUMONS (INRS TC 67-2, fiche 5) (tableau au verso à remplir)

- Les poumons des mannequins doivent être remplacés après chaque formation.

## MAQUILLAGE

- Toujours utiliser du maquillage à usage professionnel (utilisé lors de tournage de film), non périmé
- S'assurer que les participants n'ont pas d'allergie aux produits utilisés

**Nom et signature du formateur**

(Mention manuscrite : je m'engage à respecter les procédures figurant sur ce document)

**Date :**

